



ULTRAMED[®]

PROTOSCOLOS
Exclusivos

#VIVAUM
NOVO NÍVEL



FLACIDEZ: protocolo 3 camadas arquitetura em lifting

Tratamento em 3 dimensões para efeito tightening da pele, harmonização facial natural e lifting corporal como umbigo triste.

Preparo da pele com 3 sessões de Ethernia Cold Tekah até 15 dias antes da aplicação do Ultramed.

Sugestão de ponteiros facias:

▶ 4,5mm ▶ 3,0mm ▶ 1,5mm

Sugestão de ponteiros corporais:

▶ 13mm ▶ 8,0mm

Iniciando da maior profundidade para a menor e sempre no sentido de abertura e acima nas aplicações.

GORDURA LOCALIZADA

Tratamento para efeitos facias de empitiers, bichectomia e diminuição de tecido adiposo corporal.

Iniciar com sessão de Criodermis.

Sugestão de ponteiros facias:

▶ 4,5mm ▶ 3,0mm ▶ 1,5mm

Sugestão de ponteiros corporais:

▶ 16mm ▶ 13mm ▶ 8,0mm

Ps: cada paciente precisa ser avaliado de forma individual e minuciosa.

GLOW UP:

Banco de colágeno

Sendo possível associar

- ▶ Ômer utilizando peeling de carbono
- ▶ Radiofrequência
- ▶ Microagulhamento e cosmiaatria
(home care)

Sugestão de Ponteiros:

▶ 4,5mm ▶ 3,0mm ▶ 1,5mm

Sugestão de intervalo das sessões de 1 a 3 meses variando com as associações.

BBL:

Harmonização de glúteos

Tratamento voltado para cada biotipo

Podendo utilizar

- ▶ Criodermis
- ▶ Narniah
- ▶ Ultraplace em bananinha e culotes
- ▶ Hyper Slim (fortalecimento de glúteos)

Sugestão de ponteiros corporais:

- ▶ 16mm ▶ 13mm ▶ 8,0mm

FOX EYES:

Tratamento para abertura do olhar

Preparo com radiofrequência

Sugestão de ponteiros faciais:

- ▶ 1,5mm (Aplicador 2D)
- ▶ 1,5mm (Aplicador PEN)

ESTÉTICA ÍNTIMA: Externa e interna

Tratamento indicado para flacidez dos lábios internos e externos, fortalecimento vaginal e redução de monte Vênus.

Para monte Vênus iniciar com Criodermis e ultracavitação e finalização com Ultramed.

E para a região dos lábios preparar o tecido com Radiofrequência ou criofrequência

Sugestão de Ponteiros vaginais (internas):

▶ 4,5mm ▶ 3,0mm

Sugestão de Ponteira externa vulva:

▶ 3,0mm ▶ 1,5mm (Aplicador 2D)

▶ 3,0mm ▶ 1,5mm (Aplicador PEN)

FECHAMENTO DE POROS

Tratamento indicado para diminuição da oleosidade da pele, melhora do aspecto e da aparência da pele.

Associação com Ômer

Sugestão de Ponteiros:

▶ 3,0mm ▶ 1,5mm

Sem downtime e para todas as idades.

ESTRIAS HIPOTROFICAS

Indicação de estímulo de colágeno e elastina com melhora de diâmetro da estria a aparência da pele.

Possíveis associações:

- ▶ Hyper Slim
- ▶ Radiofrequência
- ▶ Orientações de colágeno oral

Sugestão de Ponteiros:

- ▶ 3,0mm ▶ 1,5mm

Tratamento indolor com resultados rápidos.

LIPO HD

Abdomen

Tratamento voltado para definir a região do abdômen, em 2012 na Colômbia pelo cirurgião plástico Alfredo Hoyos, a lipoaspiração HD é uma técnica utilizada para aspirar gordura em determinada região do corpo de maneira mais precisa. Para garantir uma maior definição do contorno dos músculos na pele, esse procedimento leva em consideração o biotipo dos pacientes. Com a Proposta da Tecnologia 9D é possível definir a pele e desenhar o musculatura não invasiva, sem cortes ou afastamento do dia-a-dia.

- ▶ 4,5 mm (Aplicador PEN) **Smas**
- ▶ 3,0 mm (Aplicador PEN)

Associação com Criolipólise (intervalo 60 dias)

Radiofrequência: sessões antes preparação da pele e após ultrassom aguardar 90 dias flacidez e gordura não tem downtime.