



MAGNI

GUIA RÁPIDO



ame sua **forma**

 **MEDICAL SAN**[®]

LIMPEZA

- Faça a limpeza do seu equipamento semanalmente e dos aplicadores após cada sessão;
- Tanto o equipamento quanto os aplicadores não devem ser molhados;
- Antes de higienizar desligue o equipamento.

CONTRAINDICAÇÕES

A utilização do Magni[®] é contraindicada:

1. Pele lesionada;
2. Inflamações ou inchaços;
3. Doenças circulatórias;
4. Osteoporose;
5. Gravidez;
6. Pacientes com fragilidade capilar;
7. Paciente com câncer;
8. Próximo a cabelos longos.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA

O equipamento necessita manutenção periódica anual para minimizar desgastes ou corrosões que possam reduzir suas propriedades mecânicas dentro do seu período de vida útil.

TRANSPORTE

O transporte do Magni[®] deve ser feito em sua embalagem original: equipamento no case, rack na caixa e aplicadores e rolos na maleta.

MANUSEIO

Durante o manuseio dos aplicadores do Magni[®] é preciso ter cuidado com as fendas próximas ao rolo. Não aproxime dedos, cabelos e quaisquer outras partes do corpo e/ou pequenos objetos que possam ser puxados pela rotação do rolo.



Aponte sua câmera aos QR-Codes abaixo para ter acesso ao treinamento e o manual do usuário do equipamento.



Treinamento
Online



Manual do
Equipamento



@medicalsabr



medicalsabr.com.br

 **MEDICAL SAN**[®]

MONTAGEM

Ao montar o Magni®, posicione o gabinete no rack, certificando-se de que os pés do gabinete estão alinhados, para encaixe perfeito no rack.

O gabinete e o rack do Magni® são transportados em embalagens separadas.

PREPARO

1. Conecte o cabo de alimentação elétrica na parte traseira do Magni® e na rede elétrica. Certifique-se que a área em torno do cabo de alimentação esteja livre.

Antes de cada sessão deve-se realizar o ajuste no cabo, apertando-o para garantir uma boa conexão.

2. Ligue o seu equipamento na chave traseira.

TELA RETRÁTIL

A tela do Magni® possui ajuste de posição, inclinando-a. Ao fazer este ajuste segure o gabinete do equipamento.



Segure aqui para dar mais estabilidade

ROLOS

Junto ao Magni® acompanham 4 rolos de aplicação: dois rolos Gold Roller (um pequeno e um grande) e dois Silicon Roller (um pequeno e um grande).

Gold Roller




Silicon Roller



CUIDADOS COM OS APLICADORES

Os aplicadores do Magni® devem ser conectados corretamente e sua trava rosqueada:

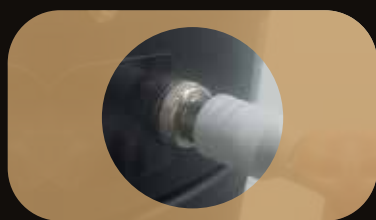

TROCANDO O ROLO

Ao realizar a substituição de um rolo dos aplicadores grande ou pequeno, certifique-se de que os encaixes do rolo e da tampa estão firmes. Como trocar:

1. Abra a tampa superior do aplicador;
2. Desencaixe o rolo da base retirando-o do aplicador pela parte superior;
3. Coloque o rolo de substituição cuidadosamente para que se encaixe na base do aplicador.
4. Alinhe o pino superior do rolo com a tampa.
5. Feche a tampa.



CONFIGURANDO O MAGNI®

POSIÇÃO DOS APLICADORES

O Magni® é composto por dois aplicadores, um grande e um pequeno. Cada um deles possui sua posição na tela de trabalho, coincidindo com o lado de sua conexão no equipamento. Portanto tenha cuidado em qual saída está plugado o aplicador e qual campo está informando os parâmetros.

Observe na imagem ao lado >



1. Esquerda Grande
2. Direita Pequeno

PASSO A PASSO

Após conectar os aplicadores, ligue o equipamento. Perceba que o campo Tempo vem selecionado e os parâmetros configurados no protocolo de salvamento 1, tanto no Aplicador Grande quanto no Aplicador Pequeno.

Para salvar um novo protocolo selecione os parâmetros, toque no ícone de protocolo 1 ou 2 e confirme.



Nos parâmetros Tempo, Velocidade e Luz o campo deve ser selecionado para que os botões sejam habilitados. Já nos parâmetros Modo e Cor o toque no campo muda o parâmetro, sem a necessidade dos botões.



Nos botões (<) e (>) do parâmetro Tempo, selecione qual o período, em minutos, de utilização daquele aplicador.



Nos botões (<) e (>) do parâmetro Velocidade, selecione qual a velocidade de rotação do rolo.



Nos botões (<) e (>) do parâmetro Luz, selecione qual intensidade de luz será irradiada daquele aplicador.



No parâmetro Modo, com o toque, defina a maneira que a luz do aplicador irradia.



No parâmetro Cor, com o toque, escolha a cor da luz do aplicador.



No parâmetro Rotação, selecione o sentido da rotação do rolo.



Play (▶) inicia a aplicação.

OBSERVAÇÕES:

1. No Aplicador Grande é possível iniciar e pausar a aplicação no próprio aplicador, assim como alterar os parâmetros de rotação e velocidade.



ÁREA DE TRABALHO

Os aplicadores P e G utilizam os mesmos parâmetros.
Os aplicadores trabalham de forma independente.

GUIA RÁPIDO

Tela de autoajuda do equipamento.

TEMPO

Tempo de aplicação (1 a 60 minutos).

VELOCIDADE

Velocidade do giro do rolo (velocidade 1 a 10).

LUZ

Intensidade da luz do aplicador (intensidade 1 a 10).

ROTAÇÃO

Muda a direção de rotação do rolo.

The diagram illustrates the control interface for the MAGNI device, showing two independent application screens. The interface is dark-themed with gold and white accents. At the top left is a home button (house icon) and a quick guide icon (info 'i'). The main area is divided into two panels. The left panel shows settings for 18 minutes, speed 5, light 5, and a square wave mode. The right panel shows settings for 38 minutes, speed 10, light 2, and a horizontal line mode. Both panels have rotation buttons (left and right arrows) and protocol buttons (1 and 2). At the bottom, there is a home button, a language selector (Brazilian flag), and the MEDICAL SAN logo. The text 'Os campos Modo e Cor trocam seus parâmetros com o toque, sem a necessidade dos botões.' is located at the bottom left.

HOME

Voltar para a tela inicial.

MODO

Modo como a luz do aplicador acende (4 modos).

COR

Muda a cor que irradia no aplicador (7 cores).

PLAY/PAUSE

Inicia e pausa a aplicação.

PROTOCOLO

Salva até dois protocolos de aplicação para cada aplicador.

IDIOMA

Trocar o idioma do equipamento.
* Ao desligar o equipamento o idioma retorna ao original.

Os campos Modo e Cor trocam seus parâmetros com o toque, sem a necessidade dos botões.